

# Flasheal™

POLISAKHARIDA  
BAHAN HEMOSTATIK



## PENGGUNAAN IDEAL UNTUK PENDARAHAN PARAH

- Pendarahan arteri dan vena.
- Semua luka berdarah topical
- Luka akibat peluru, ledakan, pisau, dan pecahan peluru



# Flasheal™



## METODE PENGGUNAAN

1. Sobek bungkus Xinhe.
2. Bersihkan sisa darah pada luka dengan kain kasa.
3. Segera tuangkan bubuk isi kantong langsung pada daerah luka.
4. Berikan tekanan yang kuat langsung pada luka selama 5 menit menggunakan kain kasa.
5. Pastikan perban terikat dengan benar agar tekanan pada luka lebih optimal.

Segera cari pertolongan medis, buang kantong yang tidak digunakan setelah dibuka.

## KEUNTUNGAN PRODUK

- Mengurangi kehilangan darah secara signifikan dan cepat.
- Mengobati luka yang bentuknya tidak teratur dan cedera ganda.
- Mudah digunakan dan diserap dengan 100 % polisakarida dan berbasis tumbuhan.
- Perawatan darurat untuk cedera pendarahan yang mengancam jiwa.
- Bertindak pada situasi kritis di mana waktu kompresi terbatas.

\* Untuk informasi lebih lanjut, silahkan merujuk ke IFU.



Keadaan darurat



Medan Perang



Farmasi



Rumah Sakit hewan

## PT. Global Alkes Nusantara

Mediterania Blok X-3, Kav. No. F-8a,  
PIK Jakarta Utara

No. Telp : +6221 36769163

Email : [global.altara68@gmail.com](mailto:global.altara68@gmail.com)